

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dot. bezpieczeństwa

W trosce o Twoje bezpieczeństwo, schodółaz Scalamobil może być obsługiwany wyłącznie przez osoby:

- przeszkolone w prawidłowej obsłudze urządzenia
- umiejące wchodzić po schodach tyłem
- potrafiące udźwignąć ciężar wynoszący co najmniej 20% własnej wagi ciała
- będące w dobrej kondycji fizycznej oraz stabilne emocjonalnie

Bezpłatne szkolenie z obsługi urządzenia jest elementem składowym dostawy. Jest przeprowadzane przez przedstawiciela firmy alber lub dystrybutora.

Na wydajność napędu urządzenia może wpływać pole elektromagnetyczne, wytwarzane między innymi przez telefony komórkowe. Z tego powodu należy wyłączać urządzenie, gdy w jego pobliżu używane są telefony komórkowe.

Na wydajność napędu urządzenia mogą wpływać inne urządzenia, np. zainstalowane w przebieralniach dużych sklepów czujniki przeciw kradzieżowe.



Nie używaj schodółazu zanim nie przejdziesz szkolenia

1.1 Skład zestawu:

- standardowy schodółaz Scalamobil S27
- ładowarka alber BC2401
- instrukcje obsługi: oryginalna oraz w języku polskim
- bolec mocujący górny
- bolec mocujący dolny

Standardowo bolce: mocujący górny [16] oraz dolny [17], dołączone są do schodółazu oraz dopasowane do rodzaju zastosowanego krzesła transportowego (siedziska).

Akcesoria dodatkowe (opcjonalne):

- X6 scalaport
- krzesło transportowe X3
- krzesło transportowe X2
- kabel ładowarki samochodowej alber 12V / 230V
- zagłówek
- kółka anty-wywrotne
- pas bezpieczeństwa



Twój wózek musi być wyposażony w specjalne płytki mocujące do schodółazu Scalamobil. W przypadku ich braku, skontaktuj się z firmą, która dostarczyła urządzenie.

